

Humasis


COVID-19 Ag Home Test

Test určený pro sebetestování

Samotest

Podrobné pokyny


KROK 1

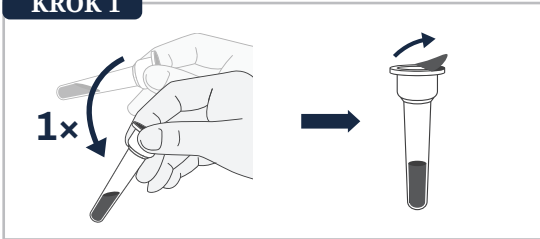

Sklepněte kapalinu v odběrové zkumavce ke dnu a poté odloupněte víčko.

KROK 2

Odebrání vzorku z nosní sliznice: *Nesprávný výtěr může vést k nepřesnému výsledku testu. To je zvláště důležité, pokud nemáte žádné příznaky.

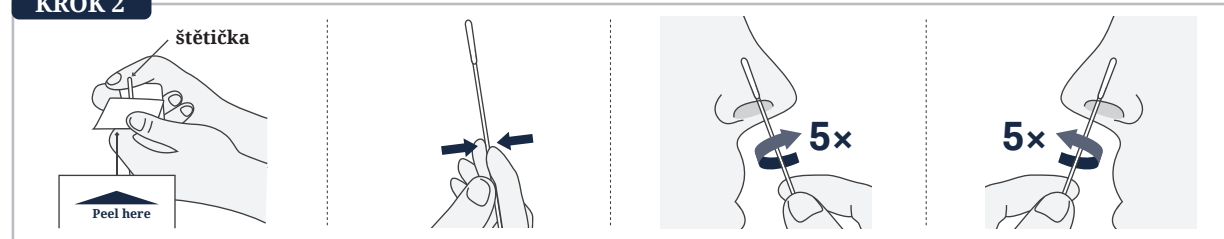


Vyhledejte nápis „PEEL HERE“ a v tomto místě otevřete balení štětčičky až do poloviny délky. Uchopte štětčičku v 1/3 její délky.

Umyjte si ruce




Před zahájením testování si umyjte ruce nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce. Před zahájením se ujistěte, že máte suché ruce.

Zkontrolujte svoji testovací sadu

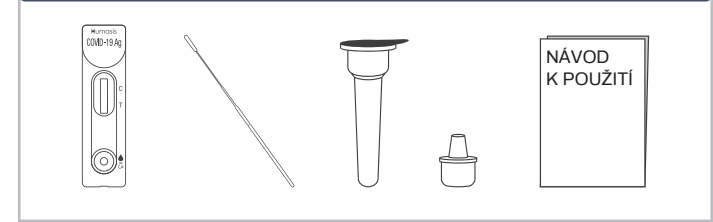

Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady. Během testování se také doporučuje používat rukavice (nejsou součástí balení). Vyjměte zkumavku a testovací destičku z obalu a umístěte je na rovný povrch.

KROK 3

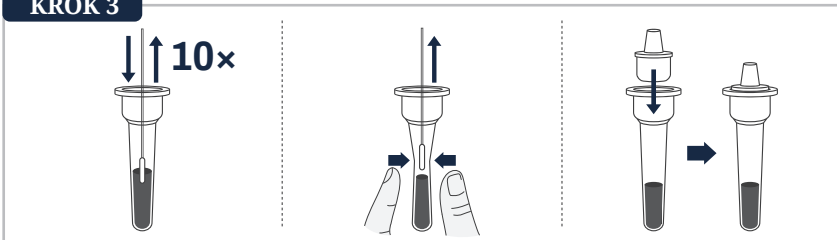

Vložte hlavu štětčičky do zkumavky a pohybujte štětčičkou nahoru a dolů alespoň 10x.

Vytáhněte štětčičku za současného tlaku na boky zkumavky, aby se veškerá tekutina dostala ze štětčičky.

Pevně nasadte víčko.

KROK 4



Nakapejte tři kapky do jamky vedle označení

KROK 5



Výsledek odečtete mezi 15–20 minutami. Neodečítejte po uplynutí 20 minut!

Likvidace



Všechny použité testovací komponenty vyhoďte do komunálního odpadu.

Umyjte si ruce



Po dokončení všech kroků si umyjte ruce nebo použijte dezinfekci na ruce.




Zkontrolujte své výsledky

NEGATIVNÍ




Pokud se objevil JEDEN PROUZEK, u „C“ a u „T“ ŽÁDNÝ PROUZEK, výsledek vašeho testu je negativní.

POZITIVNÍ

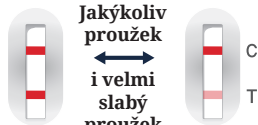

Pokud se objevily DVA PROUZEK, u „C“ a jakýkoli i slabý proužek u „T“, můžete být nakaženi COVID-19.

NEPLATNÝ

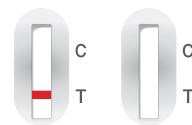

Pokud se neobjevil ŽÁDNÝ PROUZEK u „C“, jako v příkladech výše, váš test je chybný. Obratě se na prodejce.

IVD Pro diagnostické použití <i>in vitro</i>	LOT Číslo šarže	W Výrobce
i Podívejte se do návodu k použití	30°C 2°C Skladujte při 2–30 °C	X Nepoužívejte opakovaně
EC/REP Autorizovaný zástupce	REF Katalogové číslo	EXP Spotřebujte do/ Datum expirace
CE Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 98/79/ES o <i>in vitro</i> diagnostických zdravotnických prostředcích.		

Humasis Co., Ltd.
Rm. 114, 502, 504, 604, 604-1, B03-1, B03-2,
88, Jeonpa-ro, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, 14042, Republic of Korea
TEL: +82-31-478-8587, FAX: +82-31-478-8586
Email: question@humasis.com
www.humasis.com

EC/REP
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstr. 80
D-66386 St. Ingbert / Germany
TEL: +49 6894 - 58 10 20
FAX: +49 6894 - 58 10 21
Email: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Dovozce a distributor:

novatin

Novatin s.r.o., V sadech 1081/4a
160 00 Praha 6, Česká republika
+420 800 305 503
info@novatin.com
www.novatin.com



REF ACOVGS-7005



Rev. 01/2021-07-22
SA / PI-2283HU01E

