

ŠGTi-flex COVID-19 Ag

ČEŠTINA

Pouze pro použití *in vitro* sebetestováním.

Prosím před použitím výrobku si pozorně přečtete návod k použití.

IVD


REF

CAGS900E

CE 0123

Katalogové číslo: CAGT010E0, CAGT020E0, CAGT025E0, CAGT010E1, CAGT020E1, CAGT025E1, CAGT010E2, CAGT020E2, CAGT025E2

Obsah balení

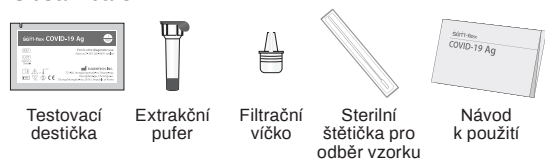

	CAGT010E0 CAGT010E1 CAGT010E2	CAGT020E0 CAGT020E1 CAGT025E2	CAGT025E0 CAGT025E1 CAGT025E2
Testov. destička	10 ks	20 ks	25 ks
Extrakční pufer	10 ks (0,3mL/zkumav.)	20 ks (0,3mL/zkumav.)	25 ks (0,3mL/zkumav.)
Filtrační víčko	10 ks	20 ks	25 ks
Sterilní štětička pro odběr vzorku	10 ks	20 ks	25 ks
Návod k použití	1 ks	1 ks	1 ks

Příprava před testem

1. Přečtete si pozorně návod k použití.
2. Připravte si hodinky (hodiny), ubrousek a buď přípravek na dezinfekci rukou nebo mýdlo a teplou vodu.
3. Zkontrolujte obsah testovací sady. Zkontrolujte, zda není nic poškozeno nebo rozbito.
4. Všechny vzorky a činidla by měly být uchovávány při pokojové teplotě a měly by zůstat homogenní 15–30 minut před testováním.


Odebrání vzorku sterilní štětičkou

SGTi-flex COVID-19 Ag může být proveden odběrem z nosu.
* Test by měl být proveden ihned po odebrání vzorku.


1. Umyjte si ruce minimálně 20 sekund s použitím mýdla a teplé vody nebo prostředku na dezinfekci rukou.



2. Před odebráním vzorku si připravte extrakční pufer. Odstraňte fóliové víčko ze zkumavky s extrakčním puferem.

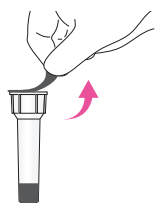


3. Umístíte extrakční zkumavku do otvoru v krabičce.

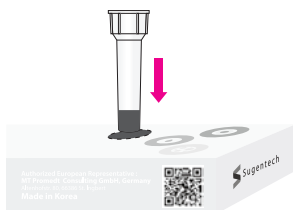


4. Otevřete uzavřený obal a vyndejte sterilní štětičku za její držátko.
*Nikdy se nedotýkejte rukama textilní špičky štětičky.




5. Odeberte si vzorek z nosu.
 - 1) Opatrně zasuňte celou absorpční špičku štětičky (obvykle 1 až 1,5 cm) dovnitř nosní dírký a pevně odeberte vzorek z nosní stěny, otáčejte nejméně 4x.
 - 2) Odběr vzorku trvá přibližně 15 sekund. Nezapomeňte odebrat všechnu nosní drenáž, která může být na štětičce přítomna.
 - 3) Jemně vyndejte štětičku.
 - 4) Použijte tu samou štětičku a zopakujte kroky 1–3 ve vaší druhé nosní díрке.

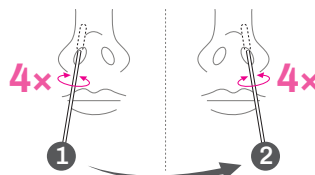


- 5) Vložte štětičku do zkumavky s extrakčním puferem a minimálně 5x s ní zatočte, aby došlo k extrakci vzorku.

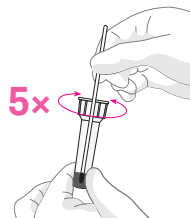

- 6) Vymějte štětičku spolu se stlačením stěn zkumavky, abyste z ní vytlačili zbývající tekutinu. Uložte štětičku do pytle na odpad.

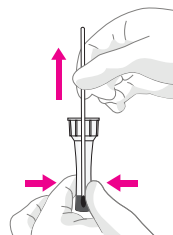

- 7) Nasadte filtrační víčko na zkumavku s extrakčním puferem. Ujistěte se, že je filtrační víčko pevně umístěno, aby nemohla tekutina nekontrolovaně vytéct.

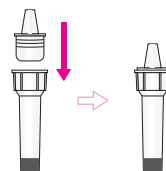


Testování vzorku

6. Otevřete obal a vyjměte testovací destičku. Položte ji na rovnou, suchou a čistou plochu.
* Testovací destička je citlivá na vlhko a měla by být použita ihned po otevření obalu.



7. Otočte zkumavku s extrakčním puferem a nasazeným filtračním víčkem vzhůru nohama a pomalu vymáčknete 3 kapky do otvoru pro vzorek na testovací destičce.
Pozor: Až když je kapka úplně vsáknuta, vymáčknete teprve další.

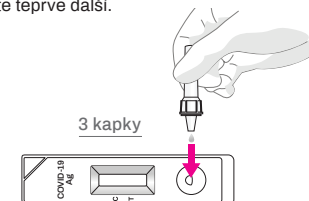

8. Počkejte 15 minut po nakapání vzorku.




Výsledek může být odečten mezi 15 a 30 minutami po tom, co byl vzorek nakapán.
*Neodečítejte vzorek před uplynutím 15 minut ani po uplynutí 30 min.



Vyhodnocení výsledků

1. **Pozitivní výsledek**
Jestliže se ve výsledkovém okénku objeví jak Testovací proužek (T), tak Kontrolní proužek (C), je výsledek na SARS-CoV-2 antigen pozitivní.
Jestliže je výsledek pozitivní, kontaktujte bezprostředně svého praktického lékaře nebo vyhledejte pomoc u profesionální lékařské instituce. Potřebujete provedení konfirmačního molekulárního testu k potvrzení virové infekce.

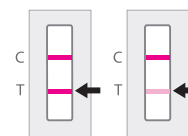

2. **Negativní výsledek**
Jestliže se ve výsledkovém okénku objeví pouze Kontrolní proužek (C), váš výsledek testu na SARS-CoV-2 antigen je negativní. Negativní výsledek nemůže zcela vyloučit možnost virové infekce. Nesprávný odběr vzorku nebo nízká virová nálož mohou způsobit falešně negativní výsledek. I nadále musíte dodržovat všechna ochranná a hygienická nařízení.



3. **Neplatný výsledek**
Pokud se ve výsledkovém okénku neobjeví Kontrolní proužek (C), výsledek testu je neplatný. Opakujte test s novou testovací destičkou.
Přečtete si pozorně návod k použití a test zopakujte. Pokud je i nadále výsledek testu neplatný, kontaktujte svého praktického lékaře nebo vyhledejte pomoc profesionálního lékařského zařízení.

