

# HAN • CHANG I-SWAB



## 01 Zamýšlené použití

Produkt je určen k odběru vzorků z nosní sliznice pro test na přítomnost virů (např. Covid-19) a bakterií rodu Chlamydia, Mycoplasma a Ureaplasma.

## 02 Konstrukce materiálů


Produkt je speciálně navržen pro jednoduchý a bezpečný odběr vzorku a má speciální zlomový bod, který zabraňuje kontaminaci během podděrové manipulace. Hlava štětičky vytvořená vložkovým tiskem z nylonu 66 a ohebný krček z polystyrenu jsou ideální pro hladký odběr bez sebemenšího zranění.

## 03 Kontrola kvality

**Produkt prošel těmito striktními testy kvality:**

1. Test cytotoxicity (ISO 10993-5;2009)
2. Maximalizační test morčete (ISO 10993 -10: 2010, 7.5)
3. Intradermální kožní test na zvířeti (ISO 10993-10;2010.6.4.)
4. Test akutní systematické toxicity (ISO 10993-11:2006)
5. Informace o materiálu -zprostředkovaný pyrogen & USP<151> Test pyrogenity (ISO 10993-11:2006)
6. Eluční test (USP)
7. Test aseptičity (USP)
8. Test výkonu (KTL; Korea Testing Laboratory)

## 04 Tvar a rozměry

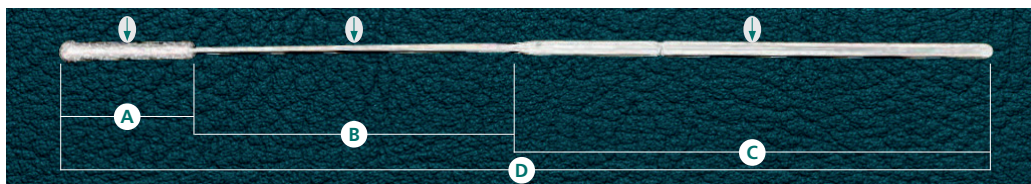

Délka (mm)			
Hlava (A)	Krček (B)	Tělo (C)	Celkem (D)
20	52	78	150

Průměr (mm)		
Hlava (A)	Krček (B)	Tělo (C)
2	1	2,5

## 05 Před použitím

- Zkontrolujte, jestli není balení poškozeno. Poškozené ani otevřené produkty nepoužívejte.
- Zkontrolujte datum expirace uvedený na balení. Nepoužívejte po datu expirace.
- Uživatel by se před použitím měl plně seznámit s principy používání.


## 06 Princip použití

- Otevřete balení, uchopte štětičku za tělo a vyndejte ji.
- Vzorky jsou odebírány za pomoci hlavy štětičky.  
(Odeberte tekutiny a sekrety z nosní nebo ústní dutiny co nejrychleji.)
- Štětičkou párkrát lehce otočte nebo přejíždějte po pacientově sliznici pro přenos vzorku na hlavu produktu.
- Umístěte vzorek do příslušné skladovací nádoby.

## 07 Upozornění

- Nevracejte produkt do původního balení.
- Nepoužívejte více než jednou. Produkt je určen na jedno použití.
- Při odběru vzorku dbejte na to, abyste neulomili hlavu nebo krček štětičky neúměrnou silou.

## 08 Obrázkový popis

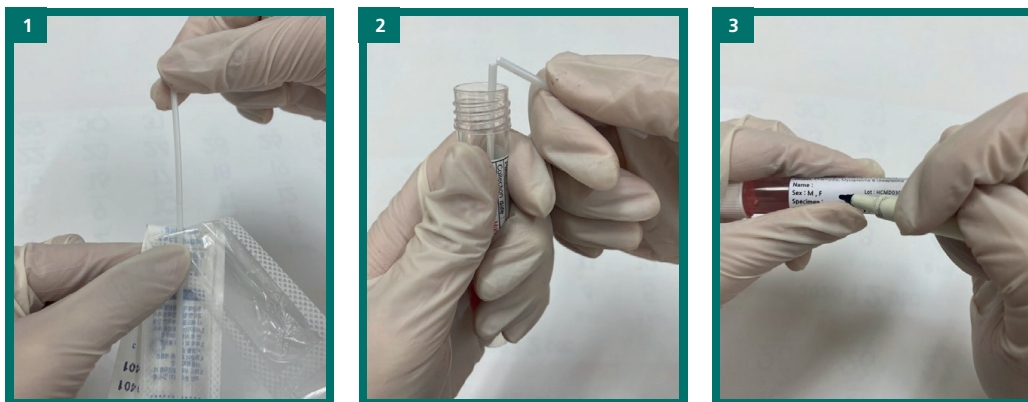

1. Vyměňte štětičku z horní části balení.
2. Po odebrání vzorku umístěte štětičku do zkumavky a odlomte ji na určeném místě jak ukazuje obrázek.
3. Pevně zašroubujte zkumavku se vzorkem a doplňte pacientovy údaje.

CZ/COV/0422020 Datum výroby materiálu 09/2020

Výrobce


**HAN·CHANG**  
 HAN CHANG  
 MADC

Tel.: +82-41-569-8898  
 E-mail: [www.biz@hcok8898](mailto:www.biz@hcok8898)

Distributor v ČR


**novatin**

Novatin s.r.o., V sadech 1081/4a, 160 00 Praha 6, Česká republika  
 + 420 800 305 503 | [info@novatin.com](mailto:info@novatin.com) | [www.novatin.com](http://www.novatin.com)